



# Как выполнить Pima CD4 тест



# Как выполнить Pima CD4 тест

- забор образца крови

- 1. Капиллярная из пальца в картридж



- 2. Венозная дозатором

- 3. Венозная капилляром


- тест

- Снять коллектор с картриджа, закрыть крышкой и поместить в Анализатор




# Как выполнить Pima CD4 тест


## Забор крови из пальца

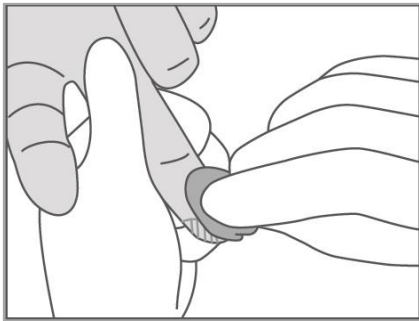


Дезинфицирование

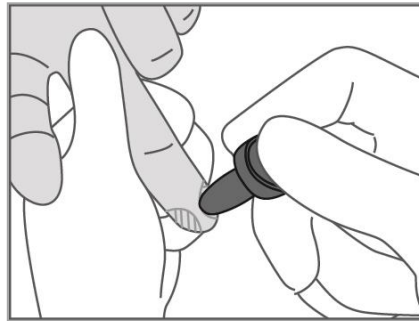


Прокол ланцетом

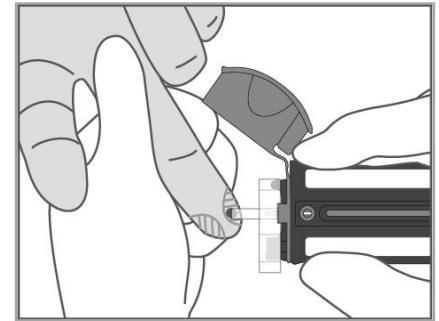


Забор образца в  
картридж

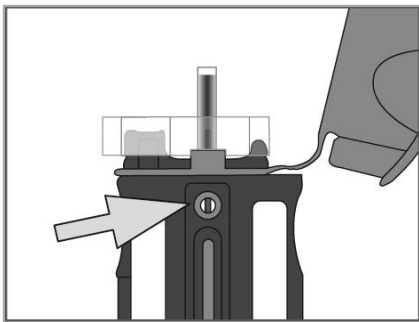

Проверка  
правильности  
заполнения

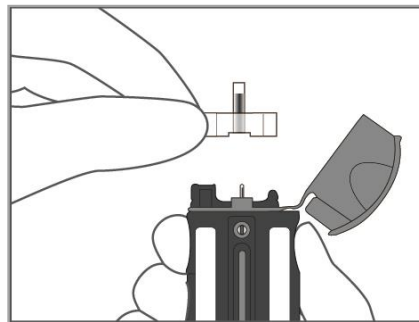

Удаление коллектора  
крови

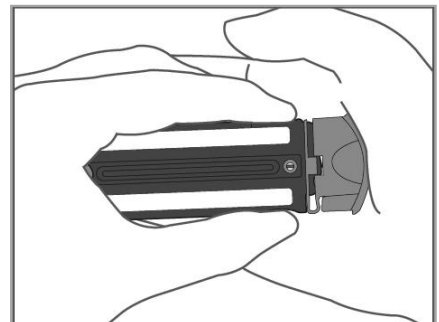

Закрытие  
картриджа  
колпачком

# Как выполнить Pima CD4 тест

Тест должен быть выполнен сразу после взятия образца крови



Нажмите Run  
Test




Вставьте  
картридж



Введите ID  
оператора



Введите ID  
образца

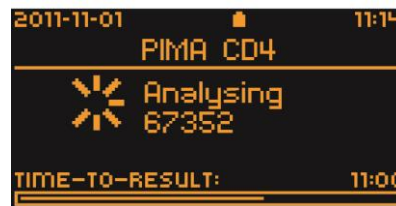

Ждите пока  
идет анализ



Результат на  
дисплее



# Как выполнить Pima CD4 тест

## Печать результатов теста

Результат может храниться в Pima Анализаторе и может быть распечатан на Pima USB принтере.



PIMA Test Report	
PIMA CD4	
Sample:	563248
CD3+CD4+:	337c/ $\mu$ l
Result Date:	2012-09-12
Start Time:	09:38
Operator:	KP
Test ID:	3
Device:	PIMA-D-001506
Software:	0.39.1
QC	
Barcode:	pass
Expiry Date:	pass
Volume:	pass
Device:	pass
Reagent:	pass
-----	
Signature	