


Экспресс-тест на ВИЧ 4-го поколения

Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo

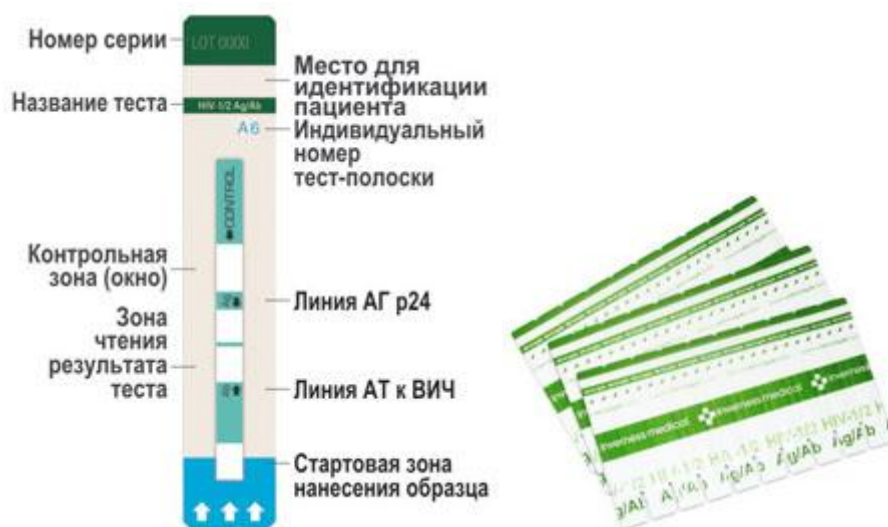

Постановка теста Детермин ВИЧ с цельной кровью

1 Отделите по перфорации тест-полоску



Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранялся номер серии, напечатанный на левой стороне карты

2 Удалите защитную фольгу



3 Нанесите тестируемый сыворотки/плазмы крови



Нанесите 50 мкл образца цельной крови, полученной из пальца или из вены, с помощью микропипетки или покрытого ЭДТА капилляра на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)



Подождите 1 минуту

4 Добавьте буфер



Нанесите из капельницы, располагаемой строго вертикально, 1 каплю буфера на стартовую зону тест-полоски



Подождите 15 минут

5 Прочтите результат



Недействительные (отсутствует контрольная полоса)



Постановка теста Детермин ВИЧ с сывороткой/плазмой крови

Отделите по перфорации тест-полоску



Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранялся номер серии, напечатанный на левой стороне карты

Удалите защитную фольгу



Нанесите тестируемый сыворотки/плазмы крови



Нанесите 50 мкл образца сыворотки/плазмы с помощью микропипетки на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)



Подождите
15 минут

4 Прочтите
результат



Недействительные
(отсутствует
контрольная полоса)

