

## Экспресс-тест на ВИЧ

# Determine™ HIV-1/2



## Постановка теста Детермин ВИЧ с цельной кровью

- Отделите по перфорации тест-полоску**  

Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранился номер серии, напечатанный на левой стороне карты
- Удалите защитную фольгу**  

Удалите защитную фольгу с правой стороны тест-полоски.
- Нанесите тестируемый образец крови**  

Нанесите 50 мкл образца цельной крови, полученной из пальца или из вены, с помощью микропипетки или покрытого ЭДТА капилляра на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)

Подождите 1 минуту
- Добавьте буфер**  

Нанесите из капельницы, располагаемой строго вертикально, 1 каплю буфера на стартовую зону тест-полоски

Подождите 15 минут
- Прочтите результат**  

Прочтите результат в зоне чтения результата теста. Контрольная зона (окно) должна быть активной (показывать две красные линии).

Недействительные (отсутствует контрольная полоса)

## Постановка теста Детермин ВИЧ с сывороткой/плазмой крови

1 Отделите по перфорации тест-полоску



Отрывать по перфорации тест-полоски следует с правой стороны карты, начиная сверху, с тем, чтобы на карте сохранился номер серии, напечатанный на левой стороне карты

2 Удалите защитную фольгу




3 Нанесите тестируемый сыворотки/плазмы крови



Нанесите 50 мкл образца сыворотки/плазмы с помощью микропипетки на стартовую зону тест-полоски (помечена стрелками)



4 Прочтите результат

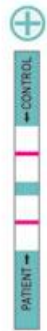

Недействительные (отсутствует контрольная полоса)

